

<b>REF</b> 513-2	6x3mL	<b>EXP</b> 2025-02-05	<b>LOT</b> Level1 30F1C92	更新日期： 2020-04 1 / 2
------------------	-------	-----------------------	---------------------------	------------------------

批号：30F1C92				
项目\仪器\试剂方法	单位	均值	+ / - 2 SD	
<b>(AFP)甲胎蛋白</b>				
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	68.6	53.5-83.7	
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	80.4	64.3-96.5	
Roche Modular E170 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	80.9	64.7-97.1	
Siemens ADVIA Centaur XP Siemens \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	60.9	48.7-73.1	
<b>(CA 125)糖类抗原 125</b>				
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	186	145-227	
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	IU/mL	281	225-337	
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	IU/mL	273	218-328	
Roche Modular E170 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	176	141-211	
Siemens ADVIA Centaur XP Siemens \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	IU/mL	227	182-272	
<b>(CA 15-3)糖类抗原 15-3</b>				
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	67.3	52.5-82.1	
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	IU/mL	117.8	94.2-141.4	
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	IU/mL	94.5	75.6-113.4	
Roche Modular E170 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	69.2	55.4-83.0	
Siemens ADVIA Centaur XP Siemens \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	IU/mL	96.4	77.1-115.7	
<b>(CA 19-9)糖类抗原 19-9</b>				
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	74.3	58.0-90.6	
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	IU/mL	400	320-480	
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	IU/mL	177	142-212	
Roche Modular E170 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	88	70-106	
Siemens ADVIA Centaur XP Siemens \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	IU/mL	179	143-215	
<b>(CA 72-4)糖类抗原 72-4</b>				
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	9.19	7.17-11.21	
Roche Modular E170 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	13.7	11.0-16.4	
<b>(CA242)糖类抗原 242</b>				
Manual GLD \ Enzyme linked immunosorbent assays (ELISA)	U/mL	40.1	32.1-48.1	
<b>(CEA)癌胚抗原</b>				
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	37.2	29.0-45.4	
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	44.8	35.8-53.8	
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	29.8	23.8-35.8	
Roche Modular E170 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	42.4	33.9-50.9	
Siemens ADVIA Centaur XP Siemens \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	24.2	19.4-29.0	
<b>(Cyfra 21-1)细胞角蛋白19片段</b>				
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	10.1	7.9-12.3	
Roche Modular E170 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	12.2	9.8-14.6	

<b>REF</b> 513-2	6x3mL	<b>EXP</b> 2025-02-05	<b>LOT</b> Level1 30F1C92	更新日期： 2020-04 2 / 2
------------------	-------	-----------------------	---------------------------	------------------------

批号：30F1C92				
项目\仪器\试剂方法	单位	均值	+ / - 2 SD	
<b>(Ferritin)铁蛋白</b>				
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	336	262-410	
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	398	318-478	
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	247	198-296	
Roche Modular E170 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	291	233-349	
Siemens ADVIA Centaur XP Siemens \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	280	224-336	
<b>(F-PSA)游离前列腺特异性抗原</b>				
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	4.43	3.46-5.40	
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	4.37	3.50-5.24	
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	6.85	5.48-8.22	
Roche Modular E170 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	4.72	3.78-5.66	
Siemens ADVIA Centaur XP Siemens \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	4.78	3.82-5.74	
<b>(hCG)人绒毛膜促性腺激素</b>				
Roche Modular E170 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	147	118-176	
Siemens ADVIA Centaur XP Siemens \ Enzyme linked immunosorbent assays (ELISA)	IU/L	99	79-119	
<b>(HE4)人附睾蛋白4</b>				
Roche Modular E170 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	272	218-326	
<b>(PSA)前列腺特异性抗原</b>				
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	16.5	12.9-20.1	
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	16.4	13.1-19.7	
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	19.5	15.6-23.4	
Roche Modular E170 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	18.3	14.6-22.0	
Siemens ADVIA Centaur XP Siemens \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	15	12-18	
<b>(SCC)鳞状细胞癌抗原</b>				
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	8.52	6.65-10.39	
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	ng/mL	13.2	10.6-15.8	
<b>(TPA)组织多肽抗原</b>				
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )	U/L	3894	3,115-4,673	
<b>(TPS)组织多肽特异抗原</b>				
Manual OTHER \ Enzyme linked immunosorbent assays (ELISA)	U/L	103	82-124	
<b>(β-hCG)人绒毛膜促性腺激素Beta亚基</b>				
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	141	113-169	

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。